



Kombi-ZE

(Teleskope/Geschiebe)

Der perfekte Ablaufplan.



DENTAL Manufaktur
Braunschweig
Korsch & May GmbH

PRAXIS



LABOR

> 1.

- . Situationsabformung
- . Abformung Gegenkiefer
- . Abformung Präparation
- . evtl. Vorbissnahme
- . Zahnfarbe bestimmen
- . je nach Größe der Versorgung den vorhandenen ZE als Planungsprothese dublieren
- . Materialangabe (Metall/Zirkon)

1 Tag Versand



5 Arbeitstage/
Labor

- . Modellherstellung
- . 1. Artikulation
- . Herstellung Indiv-Löffel für Primärkronen-Abformung
- . Herstellung Primärkronen

> 2.

- . Indiv.-Abformung mit Primärkronen
- . Vorbissnahme

1 Tag Versand



2 Arbeitstage/
Labor

- . 2. Artikulation
- . Modellherstellung
- . Herstellung Bisschabone

> 3.

- . Bissregistrierung mit Anzeichnung

1 Tag Versand



8 Arbeitstage/
Labor

- . 3. Artikulation
- . Herstellung Sekundärteleskope bzw. Geschiebe
- . Herstellung Modellgussgerüst
- . Verblendungen
- . Wachsaufstellung

> 4.

- . Gesamteinprobe
- . evtl. Bissregistrat

1 Tag Versand



5 Arbeitstage/
Labor

- . 4. Artikulatin
- . evtl. Umstellung/Korrektur zur 2. Anprobe
- . oder Fertigstellung

> 5.

- . Eingliedern